



Flebysan[®]

indossa il benessere

**LINEA
PREVENTIVA**

LINEA 12

LINEA 12

Indicazioni

Linea completa di prodotti che svolgono un'azione di prevenzione; contrastano l'aumento della pressione idrostatica facilitando il ritorno venoso. Indispensabili per eliminare pesantezza, gonfiori, prurito e crampi. Hanno superato i test di qualità e durata mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche.

Istruzioni

Raccogliere la calza fino al tallone, rovesciarla, infilare il piede e con estensione e trazione accompagnarla al sotto ginocchio o alla coscia avendo cura di stenderla, sono da evitare risvolti. Indossarle preferibilmente in posizione supina. Si raccomanda che l'arto sia asciutto.

Manutenzione

Al fine di preservare la funzionalità elastocompressiva delle calze e l'ancoraggio del silicone all'arto (modello autoreggente), se ne raccomanda il lavaggio dopo l'utilizzo, a mano a circa 30°C con sapone neutro senza ammorbidente, risciacquarle con abbondante acqua tiepida, non strizzarle, asciugarle lontano da fonti di calore, evitare di esporle alla luce diretta del sole, non stiarle.

Avvertenze

E' importante individuare la giusta taglia coadiuvati dal rivenditore in modo da ottenere il miglior risultato terapeutico. Prestare attenzione a unghie ed anelli, possono danneggiare la calza. Si consiglia l'uso di guanti in gomma. Non utilizzare direttamente su ferite aperte e cute lesa. Tenere la calza lontano dalla portata dei bambini (pericolo soffocamento).

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole.



DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
non sterile





Flebysan[®]

indossa il benessere

**LINEA
PREVENTIVA**

LINEA 18

LINEA 18

Indicazioni

Linea completa di prodotti che svolgono un'azione di prevenzione; contrastano l'aumento della pressione idrostatica facilitando il ritorno venoso. Indispensabili per eliminare pesantezza, gonfiori, prurito e crampi. Hanno superato i test di qualità e durata mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche.

Istruzioni

Raccogliere la calza fino al tallone, rovesciarla, infilare il piede e con estensione e trazione accompagnarla al sotto ginocchio o alla coscia avendo cura di stenderla, sono da evitare risvolti. Indossarle preferibilmente in posizione supina. Si raccomanda che l'arto sia asciutto.

Manutenzione

Al fine di preservare la funzionalità elastocompressiva delle calze e l'ancoraggio del silicone all'arto (modello autoreggente), se ne raccomanda il lavaggio dopo l'utilizzo, a mano a circa 30°C con sapone neutro senza ammorbidente, risciacquarle con abbondante acqua tiepida, non strizzarle, asciugarle lontano da fonti di calore, evitare di esporle alla luce diretta del sole, non stirarle.

Avvertenze

E' importante individuare la giusta taglia coadiuvati dal rivenditore in modo da ottenere il miglior risultato terapeutico. Prestare attenzione a unghie ed anelli, possono danneggiare la calza. Si consiglia l'uso di guanti in gomma. Non utilizzare direttamente su ferite aperte e cute lesa. Tenere la calza lontano dalla portata dei bambini (pericolo soffocamento).

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole.



DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
non sterile

